

筋膜リリース専用機器

# Medicellのご案内資料



株式会社MJカンパニー  
スポーツ・アスリート事業部



# Medicell とは？

---

CONCEPT

## Recovery for all Athlete

人間の**皮膚を繊細に吸う**“陰圧効果”をコアにした「**センシティブスキンリフト**」という全く新しい概念で、皮膚に優しい「陰圧」を加えることで、血流やリンパの循環力を高め、筋肉・関節の動きが良くなります。



# なぜMedicellが注目されているのか？

---

Point 1

## 筋肉の機能を整える

スポーツなどによるケガ、障害、使い過ぎによって痛めた筋肉に対し皮膚吸引を行うことで、筋肉の滑走を高め、弱った機能を整えます。

Point 2

## 可動域制限の緩和

同じ姿勢を長時間取り続けることや、怪我が原因で、骨と骨をつなぐ筋肉が緊張してしまいます。皮膚吸引を行うことで筋肉の緊張を緩め、可動域制限の緩和が期待できます。

Point 3

## 血液やリンパの循環を良くし、 ハイパフォーマンス状態を維持

血液やリンパ液の流れが悪くなると、うっ血状態となり神経を圧迫します。皮膚吸引を行うことで、皮膚と組織の隙間を広げ、血液やリンパ液の循環を良くします

# プロ野球の選手・トレーナーからの声

---



ピッチャーの**投球前後の肘、手首、肩周りのリカバリー**としてメディセルを使用すると可動域が変化します

術後トミージョン手術など、**オペ後の癒着が取れやすい。**プロ球団では普段のケアに加え、そういった場面でも使用しています



メディセルの施術後は、ボールを握った感覚やボールの指のかけりが全然違うので、**手放せないサポートアイテム**です

# 高校野球の選手・監督からの声

---



選手の**練習後の下肢、肩周りのリカバリー**としてメディセルを使用して関節部の可動域が変化します


選手のケアへの意識と、**リカバリーの大切さを自ら実感**  
今まで試合後に直帰であったかが一度メディセルでケアしてから帰宅、帰寮するようになった



ウェイトトレーニング後の、筋肉の張りや次の日の疲労感が全然違うので、**手放せないサポートアイテム**です

# Medicellのメカニズム


## Step 1

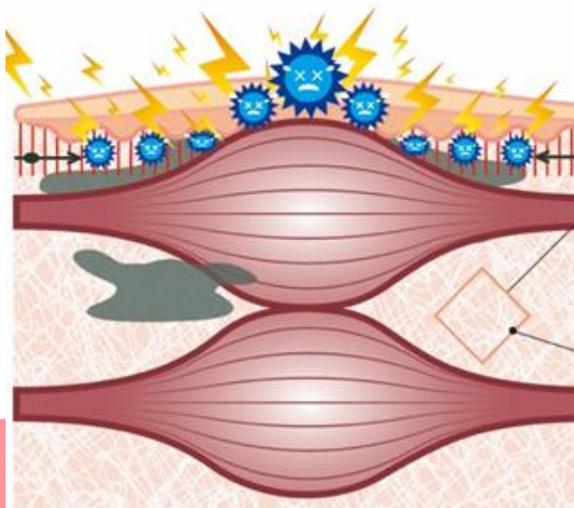

筋膜がなじれることで  
血液やリンパが停滞し  
むくみや柔軟性の低下を引き起こす  
循環不良を起こす

## Step 2

### メディセル筋膜療法

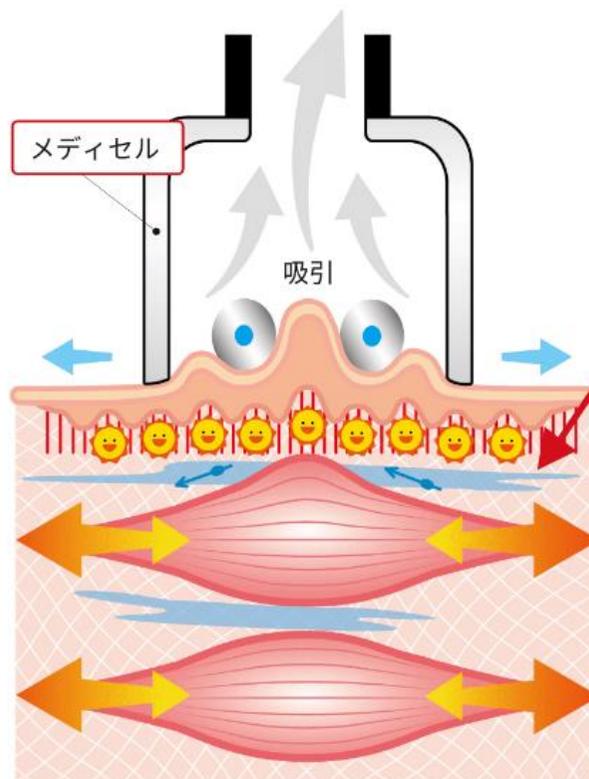


## Step 3

短時間で本来の柔軟性やパワーを  
発揮することが可能に

- ①スペースを空ける  
(筋膜・結合組織のねじれをリリース)
- ②間質液(リンパ液等)を循環させる  
(むくみ、はれ、内出血)
- ③痛みのセンサー(真皮等)から解放する
- ④筋肉を正常な出力・ポジションにする
- ⑤皮下の滑走性を上げ、可動域を広げる

筋膜「Fascia」  
(結合組織)

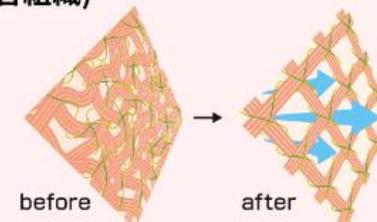

# Medicell Athlete 製品

## Medicell MINI Pro8 Athlete



専用ヘッド8本付き

納入価格 1,595,000円(税込)

※リース、ローン5年 (約29,500円/月)

メディセルMINI専用キャリーバック



### ● 付属品

- ・メディセルMINI専用キャリーケース
- ・MCケアローション  
詰め替え用3パック
- ・メディセル療法スタンダードコース  
セミナーチケット  
(有効期限：納品日から1年)

### 仕様

#### ● 寸法

高さ 250×幅 435×奥行 390mm  
(ケース収納時)

高さ 137×幅 370×奥行 184mm  
(本体のみ)

#### ● 本体重量

約11.6kg


#### ● 環境

家庭用AC100V電源

MCケアローション




# 使用方法 ～背骨～

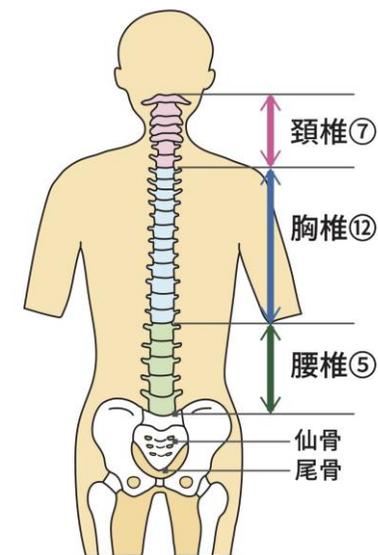


Point 1

背骨リリース

頸椎～仙骨まで約2分 10往復 目安

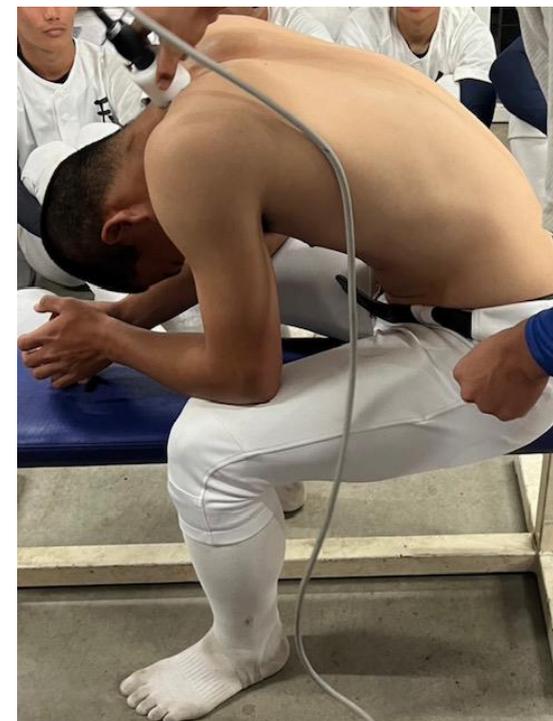


# ～胸骨・鎖骨～

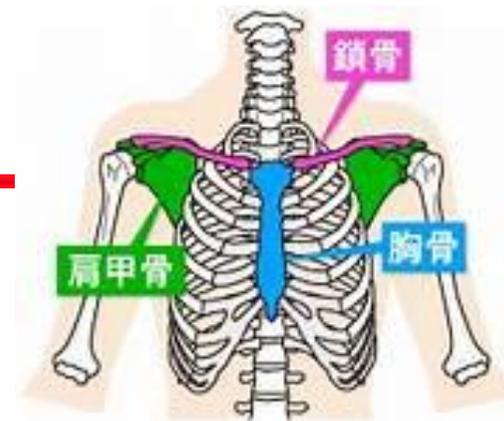

Point 1

胸骨・鎖骨

約2分 MIDモード 鎖骨下、胸骨をT字にかける

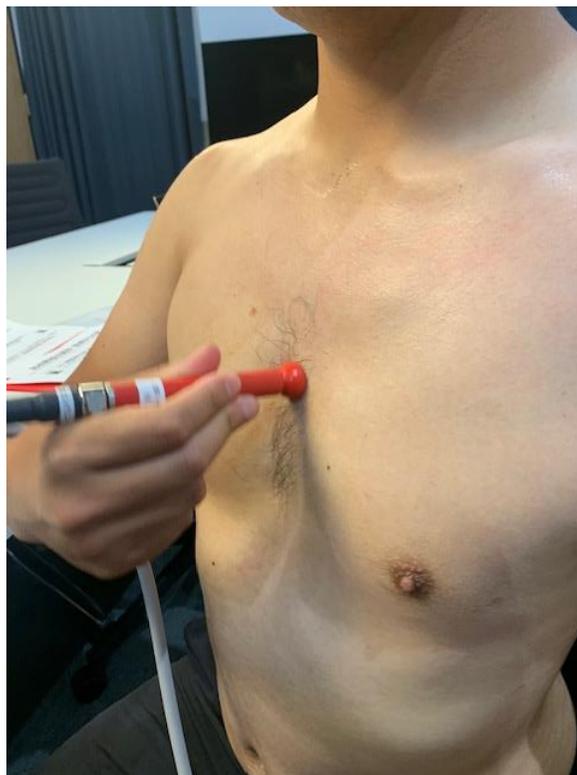

# 使用方法 ～手首～

Point 2

手首、手のひら

約2分 MIDモード 前腕、手首をストレッチした状態5往復



# 使用方法 ～手のひら～

---

Point 3

手のひら

約 1 分 highモード 手のひら、指を約2往復





# 株式会社M J カンパニー

本社

〒700-0953

岡山県岡山市南区西市308番 6

[TEL:086-246-0777](tel:086-246-0777)

東京営業所

〒108-0075

東京都港区港南2-16-1

品川East One Tower 7F

[TEL:03-6894-4027](tel:03-6894-4027)

お問い合わせ

スポーツ・アスリート事業部 福島